
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 제신 03-36 호
- 품 목 명 : 의료용게이지

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

| | |
|---------|---------------------|
| 품목명 | 사용목적 |
| 의료용 게이지 | 인체조직 등의 치수를 측정하는 기구 |

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 수술 시에 필요한 각종 기구와 재료를 준비한다.
- ② 사용 전 외관상 변형이나 크랙, 이물질 여부 등을 확인하여야 한다.
- ③ 철저하고 주의 깊게 기구를 세척해야 한다.
- ④ 세척 후 잔류물이 전혀 남지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다.
- ⑤ 멸균 시에는 멸균방법(ISO17665-1,2)을 준수한다.

| 주기 | 온도 | 노출시간 | 멸균 상태 | 건조시간 |
|------------|-------|---------|----------|---------|
| Gravity | 132°C | 15 min. | 멸균포로 랩핑* | 30 min. |
| Pre-vacuum | 132°C | 4 min. | 멸균포로 랩핑* | 30 min. |

* 허가/인증/신고된 의료용 멸균포로 랩핑하여 멸균을 진행할 것을 권장한다.

2. 사용 방법

- ① 나사(Screw)를 사용할 부위에 적당한 드릴 핀을 이용하여 구멍을 뚫는다.
- ② Main body부에 게이지부를 결합 후, 구멍 속으로 게이지부를 삽입하여 구멍 깊이를 측정한다.
- ③ 측정한 길이를 기준으로 하여 알맞은 나사 (Screw)를 선택한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

1) 세척 방법

- ① 제품을 사용한 후에는 혈액이나 잔류물 등을 제거하기 위해서 금속성이 아닌 플라스틱이나 나이론 소재의 브러시를 사용하여 세척하여야 한다.
- ② 세척 후에는 완전히 건조되었는지 확인해야 한다.

2) 보관방법

- ① 세척하여 건조 후, 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 사용 전 게이지의 외관상 표면에 흠집, 굽힘, 오염 등이 있는지 상태를 확인한다.
- ② 사용 전 게이지가 멸균 되어있는지 반드시 확인한 후, 사용해야 한다.
- ③ 시술할 깊이에 적합한 게이지를 선택하여 사용한다.
- ④ 제품 사용시 과도한 힘을 전가하지 않아야 한다.
- ⑤ 제품에 심한 충격이나 낙하 발생시 제품의 이상이 있을 경우 다른 제품으로 교체한다.
- ⑥ 반드시 수술은 전문 외과 의사에 의해 사용되어야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[본 제품은 재사용 비멸균 의료기기임]