
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 02-62호
- 품 목 명 : 수동식재사용가능의료용핸드피스

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
수동식재사용가능의료용핸드피스	인체 조직의 천자,천공,절삭하는 기구에 회전력을 전달하는 기구로서 일 반적으로 손으로 직접 사용하는 기구

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 수술 시에 사용할 각종 기구들이 소독되었는지 확인한다.
 ※ 멸균방법 (멸균기준) : 습열멸균 (ISO17665-1, 2) / 멸균조건 : 132°C에서 15분
- ② 각종 기술들이 제자리에 놓여져 있는지 확인한다.
- ③ 기구의 끝 부분의 마모 여부를 확인한다.
- ④ 드라이버 몸체에 각종 드라이버 샤프트나 드릴 비트의 장착이 견고하고 하자가 없는지 확인한다.

2. 사용 방법

- ① 사용하고자 하는 골절합용 나사를 선택한다.
- ② 골절합용 나사에 맞는 드라이버 샤프트나 드릴 비트를 드라이버 몸체에 선택하여 장착한다.
- ③ 드라이버 몸체에 장착한 드라이버 샤프트를 사용하고자 하는 나사를 선택하여 나사의 헤드에 맞춘다.
- ④ 드라이버 샤프트로 나사 헤드를 집어서 수술 부위에 놓고, 나사 헤드를 돌려서 잠근다.
- ⑤ 수술을 끝내고, 수술 부위가 견고하게 접합되었을 때, 다시 드라이버 샤프트를 이용하여 시술된 각종 나사를 반대로 돌려서 제거한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 실온의 건조한 곳에 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 수술을 시행하기 전에는 반드시 소독하여야 한다. ※ 멸균방법 (멸균기준) : 습열멸균 (ISO17665-1, 2) / 멸균조건 : 132°C에서 15분
- ② 사용시 과도한 힘을 가해서는 안 된다.
- ③ 드라이버 몸체와 드라이버 샤프트나 드릴 비트의 결합 여부를 반드시 확인해야 한다.
- ④ 사용한 후에는 항상 깨끗하게 세척한 후, 건조하여 보관해야 한다

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.