
Instructions for Use

- 제 품 명 : Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 02-140 호
- 품 목 명 : 의료용가이드

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
의료용가이드	임플란트 또는 기구의 진료, 위치, 수술부위의 표시 등을 안내하기 위하여 사용하는 기구. 단 침습형일회용 및 치과 용은 제외한다.

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 수술 시에 사용할 각종 기구들이 소독되었는지 확인한다.
- ② 각종 기구들이 제자리에 놓여져 있는지 확인한다.

2. 사용 방법

- ① 환자의 구강 내부의 턱 뼈 부위의 골절 부위를 확인한다.
- ② 시술하고자 하는 부위가 일반적인 수술 기구로 사용이 어려울 경우, 의료용 핸드피스, 의료용 가이드와 의료용 천자기를 사용하여 구멍을 뚫는다. 이때, 턱을 벌리기가 어려울 경우 의료용 개창기구를 사용하여 벌려준다.
- ③ 선택한 판을 천공 부위에 맞도록 위치시킨다.
- ④ 판을 위치시킨 후, 적합한 나사를 사용하여 고정시킨다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 실온의 건조한 곳에 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 수술을 시행하기 전에는 반드시 소독하여야 한다.
- ② 사용시 과도한 힘을 가해서는 안 된다.
- ③ 사용한 후에는 항상 깨끗하게 세척한 후, 건조하여 보관해야 한다.
- ④ 날이 무디어진 것은 사용해서는 안 된다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.