
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 02-141호
- 품 목 명 : 수동식골수술기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
수동식골수술기	골수술시 절골, 절제, 천자, 천공 등에 사용하는 수동식 수술 기구

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 수술 시에 사용할 각종 기구들이 소독되었는지 확인한다.
- ② 각종 기구들이 제자리에 놓여져 있는지 확인한다.

2. 사용 방법

- ① 환자의 골절 부위나 시술 부위를 확인한다.
- ② 사용하고자 하는 골절합용 판을 선택한다.
- ③ 선택한 판을 골절 부위나 시술 부위에 맞도록 구부릴 수 있는 판 굽힘 기구를 선택한다.
- ④ 선택한 판 굽힘 기구의 손잡이를 잡고 판을 구부린다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 실온의 건조한 곳에 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 수술을 시행하기 전에는 반드시 소독하여야 한다.
- ② 사용시 과도한 힘을 가해서는 안 된다.
- ③ 사용한 후에는 항상 깨끗하게 세척한 후, 건조하여 보관해야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.