

---

## Instructions for Use

---

- 제 품 명 : Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 06-180호
- 품 목 명 : 재사용가능수동식의료용개창기구

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.  
[jeilmed.co.kr/ko/ifu](http://jeilmed.co.kr/ko/ifu)→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
재사용가능수동식의료용개창기구	후크(hooks), 리트랙터(retractors), 분리기(separators), 유지기(retainers) 등과 같이 환부를 벌리는 데에 사용하는 기구

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 시술 전 반드시 멸균한다. (권장 멸균법: Autoclave, 멸균 조건 : 132°C, 15분)

2. 사용방법

- ① 약교정 수술 시, 골절단술 시술 절차에 따라 사용한다. (전문의에 의해서 사용)

3. 사용 후 보관 및 관리 방법

- ① 사용 후 세척하여 지정된 장소에 보관한다

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 전문의에 의해서 사용되어야 한다.
- ② 반드시 멸균을 한 후 사용해야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.