
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 07-45호
- 품 목 명 : 수동식골수술기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
수동식골수술기	골수술시 절골, 절제, 천자, 천공 등에 사용하는 수동식 수술 기구

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다.
 ※ 멸균방법 (멸균기준) : 습열멸균 (ISO17665-1, 2) / 멸균조건 : 132°C에서 15분

2. 사용방법

- ① 사용하고자 하는 용도와 부위에 따라서 적당한 것을 선택하여 사용한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다.
 ※ 멸균방법 (멸균기준) : 습열멸균 (ISO17665-1, 2) / 멸균조건 : 132°C에서 15분
- ② 사용 시 과도한 힘을 주어서는 안 된다.
- ③ 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.
- ④ 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.