
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 08-205호
- 품 목 명 : 수동식골수술기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
수동식골수술기	골수술시 절골, 절제, 천자, 천공 등에 사용하는 수동식 수술 기구

[사용방법]

- ① 사용 전 멸균한다. (권장 멸균법: Autoclave, 멸균 조건 : 121°C, 30분/ 132°C, 15분)
- ② 의료용 스크류를 이용한 수술 시에 드라이버에 스크류를 꽂은 후 수동으로 회전시켜서 해당 부위에 식립한다.
- ③ 전문의에 의해서 사용되어야 하며, 해당 수술 절차를 준용한다.

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 전문의에 의해서 사용되어야 한다.
- ② 본 제품은 사용 전에 멸균되어야 한다. (권장 멸균법: Autoclave, 멸균 조건: 121°C, 30분/ 132°C, 15분)

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.