
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 08-214호
- 품 목 명 : 치과용임플란트시술기구

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
치과용임플란트시술기구	치과용 임플란트를 시술시 스크류를 삽입할때, 토크 드라이버 등과 연결하여 조여줄때 사용하는 기구

[사용방법]

- ① 사용 전에 멸균한다. (권장 멸균법: Autoclave, 멸균 조건 : 121°C, 30분/ 132°C, 15분)
- ② 식립된 Fixture 위에 Abutment를 연결하기 위해서 사용되는 스크류의 헤드에 본 제품의 하단부를 체결한 후 본 제품의 헤드에 전용 렌치나 토크 렌치를 연결하여 회전시켜 조여 준다.

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 전문의에 의해서 사용되어야 한다.
- ② 본 제품은 사용 전에 멸균되어야 한다.

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.