
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument, Speedy Flap Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 08-218호
- 품 목 명 : 재사용가능의료용겸자

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
재사용가능의료용검자	진료시 조직을 잡거나 조작, 압박, 절단 또는 결합하기 위해 일반적으로 사용하는 검자로서 재사용이 가능하다.

[사용방법]

- ① 사용 전에 멸균한다. (권장 멸균법: Autoclave, 멸균 조건 : 121°C, 30분/ 132°C, 15분)
- ② 두개골 절골 등 수술 시에 수술 재료(플레이트, 스크류, 클램프 등)를 잡거나 제거할 때 사용한다.
- ③ 사용 후 세척하여 지정된 장소에 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 전문의에 의해서 사용되어야 한다.
- ② 본 제품은 사용 전에 멸균되어야 한다.

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.