
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 09-17호
- 품 목 명 : 수동식절골기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
수동식절골기	뼈에 홈 및 구멍을 파기 위하여 사용하는 수동식 의료용 정

[사용방법]

- ① 사용 전에 멸균한다. (권장 멸균법: Autoclave, 멸균 조건 : 121°C, 30분/ 132°C, 15분)
- ② 하악 악교정 수술시, 시상분할법에 의한 골 절단 시술 절차에 사용한다.
- ③ 사용 후 세척하여 지정된 장소에 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 전문의에 의해서 사용되어야 한다.
- ② 본 제품은 사용 전에 멸균되어야 한다.

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.