

---

## Instructions for Use

---

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 09-57호
- 품 목 명 : 수동식골수술기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.  
[jeilmed.co.kr/ko/ifu](http://jeilmed.co.kr/ko/ifu)→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
수동식골수술기	골수술시 절골, 절제, 천자, 천공 등에 사용하는 수동식 수술 기구

[사용방법]

1, 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균한다. (권장 멸균법: Autoclave, 멸균 조건 : 132°C, 15분)

2. 사용방법

- ① 시술 시에 수술 재료(악안면성형용판)을 잡거나 움직일 때에 사용한다.
- ② 111-037은 H1/Micro/Mid Plate 용이며, 111-038은 H2/Mini Plate 용으로 사용한다.

3. 사용 후 보관 및 관리 방법

- ① 사용 후 세척하여 지정된 장소에 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 전문의에 의해서 사용되어야 한다.
- ② 본 제품은 사용 전에 멸균되어야 한다.

[유효기간] 해당 사항 없음

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.