
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 09-86호
- 품 목 명 : 수동식재사용가능의료용핸드피스

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
수동식재사용가능의료용핸드피스	골 신연 시술 절차 시에 사용하는 Distractor의 이송부를 이송하기 위해서 회전시킬 때 사용하는 기구(수동식).

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 사용 전에 멸균한다. (권장 멸균법: Autoclave / 멸균 조건 : 132°C, 15분)

2. 사용방법

- ① Distractor를 이용한 골신연 시술시, 골 신연 절차에 따라 사용한다.
- ② Distractor의 Knob 또는 Hexa rod에 체결한 후 1일에 2회전시키는 것을 권장하나, 시술자의 판단에 따라 결정한다.

3. 사용 후 보관 및 관리 방법

- ① 사용 후 세척하여 지정된 장소에 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 전문의에 의해서 사용되어야 한다.
- ② 본 제품은 사용 전에 멸균되어야 한다.
- ③ 본 제품은 본사에서 제조한 Distractor에만 사용하도록 되어있다.

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.