

---

## Instructions for Use

---

- 제 품 명 : Driver Shaft
- 허가번호 : 서울 제신 10-4호
- 품 목 명 : 의료용천자기, 천착기 및 천공기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.  
[jeilmed.co.kr/ko/ifu](http://jeilmed.co.kr/ko/ifu)→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
의료용천자기, 천착기 및 천공기	골절합용 판을 구부려 식립이 용이하도록 하는 기구로 핸드피스에 연결하여 사용하는 제품

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 사용 전 멸균(고압증기멸균, 121도에서 30분 또는 132도에서 15분)한다.
- ② 각종 기구들이 제자리에 놓여져 있는지 확인한다.
- ③ 핸드피스에 각종 드라이버 샤프트의 장착이 견고하고 하자가 없는지 확인한다.

2. 사용 방법

- ① 사용하고자 하는 골절합용 판과 골절합용 나사를 선택한다.
- ② 골절합용 나사에 맞는 드라이버 샤프트를 선택하여, 의료용 핸드피스에 장착한다.
- ③ 의료용 핸드피스에 장착한 드라이버 샤프트를 사용하고자 하는 나사를 선택하여 나사의 헤드에 맞춘다.
- ④ 드라이버 샤프트로 나사 헤드를 집어 수술 부위에 놓고, 나사 헤드를 돌려서 잠근다.
- ⑤ 식립한 골절합용 판의 구멍에 골절합용 나사의 위치가 용이하지 않을 경우, 핸드피스에 벤더 샤프트(Bender Shaft)를 결합하여, 골절합용 판의 구멍에 벤더 샤프트(Bender Shaft)의 홈을 맞춘 후 핸드피스를 회전시켜 골절합용 판의 구멍(Hall)과 구멍(Hall)사이를 이어주는 바(Bar)를 구부린다.
- ⑥ 골절합용 판의 위치가 식립하고자 하는 위치와 일치했을 때, 벤더 샤프트(Bender Shaft)를 골절합용 판과 분리시킨다.
- ⑦ 골절합용 나사를 이용하여 골절합용 판을 고정시킨다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 사용 후에는 깨끗이 세척한다.
- ② 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 수술을 시행하기 전에는 반드시 소독을 해야 한다.
- ② 사용시 과도한 힘을 가해서는 안 된다.
- ③ 의료용 핸드피스와 벤더 샤프트(Bender Shaft)의 결합 여부를 반드시 확인해야 한다.
- ④ 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.