
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 10-24호
- 품 목 명 : 재사용가능의료용겸자

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
재사용가능의료용겸자	진료시 두개성형판 (Mesh Plate Type)의 형상을 변형시켜 두개골에 안착이 용이하도록 하는 겸자로서 재사용이 가능하다.

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- 1) 시술 시에 사용할 각종 기구들이 소독되었는지 확인한다.
- 2) 각종 기구들이 제자리에 놓여져 있는지 확인한다.

2. 사용 방법

- 1) 사용하고자 하는 두개성형판 (Mesh Plate Type)을 선택한다.
- 2) 선택한 두개성형판 (Mesh Plate Type)을 환자의 시술부위의 크기에 맞도록 기구를 이용하여 절단한다.
- 3) 절단된 두개성형판 (Mesh Plate Type)을 두개골 형상에 맞도록 손으로 변형시킨다.
- 4) 변형시킨 두개성형판 (Mesh Plate Type)을 본 벤더사이에 넣고, 두개성형판(Mesh Plate Type)을 이동시키면서 손잡이에 힘을 주어 환자의 시술부위에 맞도록 변형시킨다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- 1) 사용 후에는 깨끗이 세척한다.
- 2) 고압증기멸균을 한다.
 멸균방법 : 132°C 15분 또는 121°C 30분
- 3) 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

- 1) 수술을 시행하기 전에는 반드시 소독을 한다.
- 2) 벤더 상/하판이 손잡이와 안정적으로 결합되어 있는지 반드시 확인한다.
- 3) 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.