
Instructions for Use

- 제 품 명 : Driver Shaft
- 허가번호 : 서울 제신 10-31호
- 품 목 명 : 의료용천자기, 천착기 및 천공기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
의료용천자기, 천착기 및 천공기	"Tack" 형상의 나사를 집어서 식립하거나 고정시킬 때, 의료용 핸드피스와 결합하여 사용.

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 사용 전 멸균(고압증기멸균, 121도에서 30분 또는 132도에서 15분)한다.
- ② 각종 기구들이 제자리에 놓여져 있는지 확인한다.
- ③ 핸드피스에 각종 드라이버 샤프트의 장착이 견고하고 하자가 없는지 확인한다.

2. 사용 방법

- ① 사용하고자 하는 "Tack" 형상의 나사를 선택한다.
- ② 드라이버 샤프트를 의료용 핸드피스 몸체에 장착한다.
- ③ 드라이버에서 Cap을 분리한다. (113-JT-101, 113-JT-103 제품만 해당)
- ④ 의료용 핸드피스 몸체에 장착한 드라이버 샤프트를 사용하고자 하는 나사의 헤드와 결합한다.
- ⑤ 드라이버 샤프트로 나사 헤드를 집어서 시술 부위에 놓고, 시술부위에 힘을 주어 식립 하거나, 의료용 핸드피스 뒷부분을 의료용 망치를 이용하여 충격을 주어 식립한다.
- ⑥ 수술을 끝내고, 수술 부위가 견고하게 접합되었을 때, 기구를 이용하여 "Tack" 형상의 나사를 제거한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 사용 후에는 깨끗이 세척한다.
- ② 실온의 건조한 곳에서 보관한다.
- ③ 단, 113-JT-101과 113-JT-103은 드라이버 샤프트(Driver shaft)와 캡(Cap)을 결합한 후 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 수술을 시행하기 전에는 반드시 소독을 해야 한다.
(권장 멸균법 : Steam Sterilization(Autoclave), 멸균 조건 : 132°C 15분)
- ② 사용시 과도한 힘을 가해서는 안된다.
- ③ 의료용 핸드피스 몸체와 드라이버 샤프트의 결합 여부를 반드시 확인해야 한다.

- ④ 사용하고자 하는 "Tack" 형상 나사의 전용 드라이버 샤프트를 사용해야만 나사 헤드의 손상을 방지할 수 있다.
- ⑤ 113-JT-101과 113-JT-103은 반드시 드라이버샤프트(Driver shaft)와 캡(Cap)을 결합하여 보관해야만 드라이버 샤프트 (Driver Shaft)의 손상을 방지할 수 있다.
- ⑥ 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.