
Instructions for Use

- 제 품 명 : Drill
- 허가번호 : 서울 제신 10-42호
- 품 목 명 : 수동식재사용가능의료용천자기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
수동식재사용가능의료용천자기	생체 조직 등을 천자하는 수동식 기기로 재사용 가능하다. 송곳(drill), 리머(reamer) 등이 있으며 뼈에 보형물을 삽입하기 위하여 천자된 부위를 확대하는 데에 사용하는 기기를 포함한다.

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 수술 시에 사용할 각종 기구들이 멸균되었는지 확인한다. (고압증기멸균(Autoclave) : 132°C 15분)
- ② 각종 기구들이 제자리에 놓여져 있는지 확인한다.
- ③ 드릴 비트의 마모 여부를 확인한다.
- ④ 의료용 드릴이나 의료용 핸드피스와 각종 드릴의 장착이 견고하고 하자가 없는지 확인한다.

2. 사용 방법

- ① 사용하고자 하는 각종 드릴 비트를 선택한다.
- ② 선택한 드릴 비트를 소형 의료용 드릴이나 의료용 핸드피스에 장착한다.
- ③ 장착된 드릴 비트를 이용하여 시술하고자 하는 부위에 적당한 구멍을 만든다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 사용 후에는 깨끗이 세척한다.
- ② 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 시술 전 반드시 멸균해야 한다.
- ② 사용시 과도한 힘을 가해서는 안 된다.
- ③ 날의 마모 여부를 확인하여, 마모된 드릴 비트는 폐기하여 수술시 사용하지 않도록 한다.
- ④ 수술하고자 하는 부위에 적당한 드릴 비트를 선택하여 사용하도록 한다.
- ⑤ 의료용 드릴이나 의료용 핸드피스와 각종 드릴 비트의 결합여부를 반드시 확인한다.
- ⑥ 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.