
Instructions for Use

- 제 품 명 : Driver Shaft
- 허가번호 : 서울 제신 10-47호
- 품 목 명 : 수동식골수술기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
수동식골수술기	본 제품은 외과 수술 시, 나사를 집어서 고정시킬 때 의료용 핸드피스와 결합하여 사용하는 기구이다.

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 사용하기 전에는 반드시 멸균한다.
(권장 멸균법: Autoclave, 멸균 조건 : 132°C, 15분)
- ② 각종 기구들이 제자리에 놓여 있는지 확인한다.
- ③ 의료용 핸드피스의 몸체에 각종 드라이버 샤프트의 장착이 견고하고 하자가 없는지 확인한다.

2. 사용 방법

- ① 사용하고자 하는 골절합용 나사를 선택한다.
- ② 골절합용 나사에 맞는 드라이버 샤프트를 선택하여, 의료용 핸드피스 몸체에 장착한다.
- ③ 의료용 핸드피스 몸체에 장착한 드라이버 샤프트를 사용하고자 하는 나사의 헤드와 결합한다.
- ④ 드라이버 샤프트로 나사 헤드를 집어서 수술 부위에 놓고, 의료용 핸드피스 몸체를 돌려서 잠근다.
- ⑤ 수술을 끝내고, 수술 부위가 견고하게 접합되었을 때, 다시 의료용 핸드피스와 결합된 드라이버 샤프트를 이용하여 시술된 각종 나사를 반대로 돌려서 제거한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 사용 후에는 깨끗이 세척하여 지정된 장소에 보관한다.
- ② 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

1. 사용시 주의사항

- ① 수술을 시행하기 전에는 반드시 멸균한다.
- ② 사용 시 과도한 힘을 가해서는 안 된다.
- ③ 의료용 핸드피스 몸체와 드라이버 샤프트의 결합 여부를 반드시 확인해야 한다.
- ④ 사용하고자 하는 나사의 헤드와 일치하는 드라이버 샤프트를 사용해야만 나사 헤드의 손상을 방지할 수 있다.
- ⑤ 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

2. 유효기간 : 해당사항 없음

3. 보관조건 및 저장방법

실온의 건조한 곳에서 보관한다.