
Instructions for Use

- 제 품 명 : Driver Shaft
- 허가번호 : 서울 제신 10-48호
- 품 목 명 : 의료용천자기, 천착기 및 천공기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

| 품목명 | 사용목적 |
|-------------------|--|
| 의료용전자기, 천착기 및 천공기 | 교정수술시 사용하는 나사를 식립할 부위의 조직을 천자, 천공, 절삭하는 나사에 회전력을 전달하고자 할 때, 의료용 핸드피스와 결합하여 사용하는 드라이버 샤프트 이다. |

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 사용하기 전에는 반드시 멸균한다.
(권장 멸균법: Autoclave, 멸균 조건 : 132°C, 15분)
- ② 각종 기구들이 제자리에 놓여 있는지 확인한다.
- ③ 기구 연결 부위의 마모 여부를 확인한다.
- ④ 드라이버 샤프트가 의료용 핸드피스 몸체나 치과용 엔진과 연결하여 사용할 때 장착이 견고하고 하자가 없는지 확인한다.
- ⑤ 반드시 전문의에 의해서 사용되어야 한다.

2. 사용 방법

- ① 사용하고자 하는 교정용 나사를 선택한다.
- ② 교정용 나사 헤드에 맞는 드라이버 샤프트를 선택하여 의료용 핸드피스 몸체에 장착한다.
- ③ 드라이버 샤프트로 사용하고자 하는 교정용 나사를 픽업 (Pick up)한다.
- ④ 나사를 식립하고자 하는 부위에 두고, 의료용 핸드피스 몸체를 돌리거나, 치과용 엔진을 작동시켜 나사를 식립한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 사용 후에는 깨끗이 세척하여 지정된 장소에 보관한다.
- ② 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 수술을 시행하기 전에는 반드시 멸균한다.
- ② 사용 시 과도한 힘을 가해서는 안 된다.
- ③ 의료용 핸드피스 몸체와 드라이버 샤프트의 결합 여부를 반드시 확인해야 한다.
- ④ 사용하고자 하는 나사의 헤드와 일치하는 드라이버 샤프트를 사용해야만 나사 헤드의 손상을 방지할 수 있다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.