

---

## Instructions for Use

---

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 10-188호
- 품 목 명 : 정형용형판(템플레이트)

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.  
[jeilmed.co.kr/ko/ifu](http://jeilmed.co.kr/ko/ifu)→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
정형용형판(템플레이트)	시술 시 골절합용판의 위치 선정 및 수술 부위의 표시 등에 사용하는 기구.

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- 1) 본 제품은 반드시 멸균하여 사용하여야 한다.  
(권장 멸균법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15분)
- 2) 멸균 후에는 제품 표면의 수분을 깨끗이 제거한다.
- 3) 시술 시 사용할 각종 기구들이 제자리에 놓여 있는지 확인한다.
- 4) 본 제품은 반드시 관련 전문의에 의해 사용되어야 한다.

2. 사용 방법

- 1) 시술자는 환자에게 이식되어질 골절합용판의 형상을 확인하고 해당 형상에 맞는 템플레이트를 선택한다.
- 2) 템플레이트를 벤딩시켜서 시술위치에 적합한 형상으로 변형시킨다.
- 3) 변형시킨 템플레이트 형상을 참조하여 골절합용판을 이식하기 이전의 위치 선정 및 수술 부위 표시 등에 적절히 사용한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- 1) 사용 후에는 깨끗이 세척한다.
- 2) 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

- 1) 본 제품은 비멸균 상태로 공급되기 때문에, 사용하기 전에 반드시 멸균하여야 한다.  
(권장 멸균법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15분)
- 2) 시술자는 제품을 사용 전에 제품의 상태를 확인하고 이물질 등이 없는지 확인한다.
- 3) 본 제품은 골절합용판을 이식하기 이전에 위치 선정 및 수술 부위를 표시하는데 사용하는 정형용형판으로써, 각 제품에 해당하는 골절합용판 형상에 대한 내용을 숙지하여 시술 시 올바른 템플레이트를 선택하도록 하여야 한다.
- 4) 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.