

---

## Instructions for Use

---

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 11-59호
- 품 목 명 : 의료용가이드

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.  
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
의료용가이드	기구의 진로, 위치, 수술부위의 표시 등을 안내하기 위하여 사용하는 기구

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 시술 전 사용할 기구들을 세척한다.
- ② 시술 전 각종 기구들이 제자리에 놓여져 있는지 확인한다.
- ③ 본 제품은 비멸균 상태로 공급되어지므로 사용 전 반드시 멸균하여 사용한다.  
(멸균 방법: 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건: 132°C에서 15분 )

2. 사용 방법

- ① 중간의 손잡이를 부분을 잡고 천자를 할 부분에 위치시킨 후 양 끝에 구멍이 있는 곳에 드릴을 넣고 천자한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 사용 후에는 깨끗이 세척하여 지정된 장소에서 보관한다.
- ② 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

- 가. 반드시 전문의에 의해서 사용되어야 한다.
- 나. 본 제품은 비멸균 상태로 공급되어 지므로 사용전 반드시 멸균하여 사용하도록 한다.
- 다. 제품에 피가 묻어서 굳어졌을 때 부식이 일어날 수 있으므로 사용 전과 후에 반드시 세척한다.
- 라. 사용도중 부식 등이 발견되었을 경우 즉시 사용을 중단한다.
- 마. 반드시 정해진 용도로만 사용하고, 이외의 용도로 사용하지 않도록 한다.
- 바. 실온의 건조한 곳에서 보관한다.