
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 11-257호
- 품 목 명 : 의료용누르개

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
의료용누르개	시술 재료를 눌러주기 위해 사용하는 의료용누르개

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다.
(권장 멸균법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15분)

2. 사용 방법

- ① 시술 부위를 확인한다.
- ② 시술 부위에 시술 재료의 안착이 용이하도록 시술 재료를 눌러 준다.
- ③ 시술 부위에 따른 시술 방법은 시술자의 판단에 따른다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 사용 후 세척하여 지정된 장소에 보관한다.

[사용시 주의사항]

- 1) 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다.
(권장 멸균법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15 분)
- 2) 사용 시 과도한 힘을 주어서는 안 된다.
- 3) 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.
- 4) 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.