

---

## Instructions for Use

---

- 제 품 명 : Mesh Punch
- 허가번호 : 서울 제신 12-99호
- 품 목 명 : 수동식재사용의료용천공기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.  
[jeilmed.co.kr/ko/ifu](http://jeilmed.co.kr/ko/ifu)→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
수동식재사용의료용천공기	조직 또는 뼈에 천공하기 위해 사용하는 수동식 기기로 재 사용 가능하다.

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품의 외관 상태 및 마모 등의 여부를 확인한다.
- ② 시술 전 각종 기구들이 제자리에 놓여져 있는지 확인한다.
- ③ 본 제품은 사용 전 반드시 멸균하여 사용한다.  
(멸균 방법: 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건: 132°C에서 15분 )

2. 사용 방법

- ① 치주재생유도재의 천공부위(고정재가 삽입될 부위)를 메쉬 천공기(Mesh Punch)내 Punching 위치를 맞춘 후, 펀치 로드 (Punch Road)를 눌러 해당 위치에 구멍을 뚫는다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 사용 후에는 깨끗이 세척하여 지정된 장소에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다.  
(멸균 방법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15 분)
- ② 사용 시 과도한 힘을 주어서는 안 된다.
- ③ 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.
- ④ 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 비닐(Vinyl packaging)에 포장한 뒤 상온(15~25°C)의 건조한 곳에서 보관한다.