

---

## Instructions for Use

---

- 제 품 명 : Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 13-26호
- 품 목 명 : 재사용가능범용수동식의료용핀셋

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.  
[jeilmed.co.kr/ko/ifu](http://jeilmed.co.kr/ko/ifu)→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
재사용가능범용수동식의료용핀셋	진료시에 일반적으로 사용되는 핀셋으로 재사용이 가능하다.

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다.  
(권장 멸균법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15분)

2. 사용 방법

- ① 사용하고자 하는 용도와 부위에 따라서 적당한 것을 선택하여 사용한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 제품을 사용한 후에는 혈액이나 잔유물 등을 제거하기 위해서 금속성이 아닌 플라스틱이나 나이론 소재의 블러쉬를 사용하여 세척한다.
- ② 깨끗하게 세척한 후, 완전히 건조시켜 실온의 건조한 곳에 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다.  
(권장 멸균법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15 분)
- ② 사용 시 과도한 힘을 주어서는 안 된다.
- ③ 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.
- ④ 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 사용한 기구는 깨끗하고 건조한 상온에서 보관한다.