
Instructions for Use

- 제 품 명 : JEIL EZ Plier
- 허가번호 : 서울 제신 15-178호
- 품 목 명 : 의료결찰안내기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
의료결찰안내기	결찰을 용이하게 하기 위해 사용하는 기구

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품의 외관 상태 및 마모 등의 여부를 확인한다.
- ② 시술 전 각종 기구들이 제자리에 놓여져 있는지 확인한다.
- ③ 본 제품은 사용 전 반드시 멸균하여 사용한다.
(멸균 방법: 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건: 132°C에서 15분)

2. 사용 방법

- ① 교정 치료 부위를 확인한다.
- ② 교정용 와이어 등을 결찰하기 위해서 기기의 양 끝단을 확인한 후 사용한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 사용 후에는 깨끗이 세척하여 지정된 장소에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다.
(멸균 방법: 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건: 132°C 에서 15 분)
- ② 사용 시 과도한 힘을 주어서는 안 된다.
- ③ 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.
- ④ 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.