

---

## Instructions for Use

---

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 15-238호
- 품 목 명 : 재사용가능수동식의료용가위

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.  
[jeilmed.co.kr/ko/ifu](http://jeilmed.co.kr/ko/ifu)→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
재사용가능수동식의료용가위	인체 조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 수동식 의료용 가위로서 재사용이 가능하다.

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다.  
(멸균 방법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15분)

2. 사용 방법

- ① 용도에 따라서, 소독된 가위를 선택하여 사용한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 수술을 시행하기 전에는 반드시 소독하여야 한다.
- ② 사용시 과도한 힘을 가해서는 안 된다.
- ③ 사용한 후에는 항상 깨끗하게 세척한 후, 건조하여 보관해야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.