

---

## Instructions for Use

---

- 제 품 명 : Length Guide
- 허가번호 : 제신 17-399호
- 품 목 명 : 의료용측정자

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.  
[jeilmed.co.kr/ko/ifu](http://jeilmed.co.kr/ko/ifu)→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
의료용측정자	외과 수술시 해부학적 구조의 규격을 측정하여 보철물 교체와 이식조직의 규격을 결정하기 위한 수술기구

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ① 수술 시에 필요한 각종 기구와 재료를 준비한다.
- ② 기구와 재료가 멸균되었는지 확인한다.  
(멸균조건 : 고압증기멸균 Autoclave / 132°C, 15분)

2. 사용 방법

- ① 사용할 부위에 기구를 사용하여 인체의 규격을 측정한다.
- ② 측정한 길이를 기준으로 하여 알맞은 제품을 선택한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용시 주의사항]

- 사용하기 전 제품의 상태를 확인한다.
- 사용 전 제품이 멸균되어 있는지 반드시 확인한 후, 사용해야 한다.
- 제품을 사용한 후에는 혈액이나 잔유물 등을 제거하기 위해서 금속성이 아닌 플라스틱이나 나이론소재의 브러쉬를 사용하여 세척하여야 한다.
- 세척 후에는 완전히 건조되었는지 확인해야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.